

Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation : elles contiennent des informations importantes sur la façon d'utiliser ce produit. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre pharmacien, à votre médecin, ou contactez-nous.

BAUSCH+LOMB

Aqualarm™ Intensive UD

Acide hyaluronique à 0,2 %

Composition :

0,2 % d'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique dodécahydraté, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté et eau pour injection.

Aqualarm™ Intensive UD ne contient pas de conservateur.

Indications :

Lubrifiant pour les yeux et pour humidifier les lentilles de contact souples et rigides lorsque portées.

Quelles sont les indications d'Aqualarm™ Intensive UD ?

Aqualarm™ Intensive UD est indiqué pour les cas de sécheresse oculaire causée par des facteurs environnementaux extérieurs. Ces facteurs comprennent souvent l'utilisation fréquente d'un ordinateur, l'air conditionné, un clignement des yeux insuffisant, la fumée de cigarette et le vent.

De plus, certains traitements (comme les contraceptifs oraux, les antihistaminiques, les bêta-bloquants, les antispasmodiques et les diurétiques), certaines pathologies et certains conservateurs présents dans les collyres jouent un rôle important dans le développement de la sécheresse oculaire.


Aqualarm™ Intensive UD hydrate les yeux et soulage les symptômes de la sécheresse oculaire tels que les irritations, la sensation de sécheresse ou la fatigue oculaire, la sensation de corps étranger ou le larmoiement. Compte-tenu des propriétés du produit, les personnes ayant une sécheresse oculaire chronique peuvent l'utiliser.

Pendant combien de temps et à quelle fréquence devez-vous utiliser Aqualarm™ Intensive UD ?

Instiller une goutte de Aqualarm™ Intensive UD dans l'œil lorsque vous en ressentez le besoin. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement et aussi souvent que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite de durée d'utilisation. Jeter le récipient unidose après utilisation.

Comment utiliser Aqualarm™ Intensive UD ?

1. Détachez soigneusement un récipient unidose.

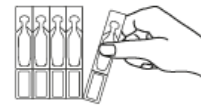

2. En le tournant (sans tirer), retirez l'embout détachable du récipient unidose.



3. Penchez légèrement votre tête en arrière et abaissez doucement la paupière inférieure à l'aide d'un des doigts de votre main libre. Maintenez le flacon unidose dans une position aussi verticale que possible au-dessus de votre œil avec le bec orienté vers le bas. Assurez-vous que le flacon unidose ne touche pas votre œil afin d'éviter toute blessure éventuelle. Pressez ensuite doucement le flacon unidose pour appliquer une à deux gouttes.



Fermez ensuite votre œil et faites des mouvements de va-et-vient lentement pour répartir de manière optimale la goutte sur la surface de votre œil.

Dans quel cas est-il déconseillé d'utiliser Aqualarm™ Intensive UD ?

N'utilisez pas ce produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

Informations importantes concernant l'utilisation d'Aqualarm™ Intensive UD :

- Des réactions d'hypersensibilité locale ont été rarement signalées. Dans ce cas, le traitement doit alors être interrompu. En cas d'irritation ou d'inconfort persistant, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.
- Information de sécurité pour les patients présentant de graves lésions de la cornée : Dans de très rares cas, des dépôts de phosphate de calcium sur la cornée ont été rapportés lors d'un traitement avec des produits contenant du phosphate à usage ophtalmique.
- Ne touchez pas la surface de l'œil avec l'embout du flacon unidose afin d'éviter toute blessure éventuelle.
- Attendez environ 15 minutes avant d'utiliser un autre produit ophtalmique.
- Ne pas réutiliser.
- La réutilisation du produit présente un risque potentiel d'infection pour l'utilisateur.
- Chaque unidose doit être jetée après utilisation.
- N'utilisez pas le produit après la date limite d'utilisation.
- N'utilisez pas le produit si l'emballage ou le récipient unidose est endommagé.
- Aqualarm™ Intensive UD est conditionné dans de petites pièces en plastique pouvant être avalées par de jeunes enfants. Il y a un risque d'étouffement. Par conséquent, Aqualarm™ Intensive UD doit être tenu hors de la portée des enfants.
- Aqualarm™ Intensive UD peut être utilisé avec des lentilles de contact souples et rigides.
- Ce dispositif peut être utilisé par une personne non initiée n'ayant reçu aucune formation particulière.
- Selon les connaissances actuelles, ce produit peut être utilisé chez les femmes enceintes ou allaitantes et chez les enfants.
- Si votre enfant souffre de sécheresse oculaire, consultez un médecin avant d'utiliser un lubrifiant oculaire.

Comment conserver Aqualarm™ Intensive UD ?
À conserver à une température comprise entre + 1 °C et + 25 °C.

Élimination :

Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Tout incident grave dû à l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et à l'ANSM.

Quels conditionnements sont disponibles ?

Aqualarm™ Intensive UD existe également en format flacon de 10 mL.


Explication des symboles



Stérilisé à l'aide de techniques de traitement aseptiques



Système de barrière stérile unique

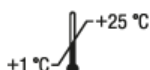

Limite de température



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation



www.bausch.com/IFU

Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique



Date limite d'utilisation



Code de lot



Dispositif Médical



Identifiant unique de dispositif
GTIN (01) identifiant de dispositif
EXP (17) date limite d'utilisation
(format : aammjj)
LOT (10) code de lot



Ne pas réutiliser



Date de fabrication



Fabricant :
Dr. Gerhard Mann chem.-
pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin - Allemagne



Marquage de conformité CE
Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié

Information médicale : +33 (0)4 67 12 30 30

Date de publication :

Aqualarm Intensive UD, « I764EU-06 ; (2025-11)



348E05-09.25 49070PB764/5-FR