

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin, votre ophtalmologiste, ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

BAUSCH + LOMB Aqualarm™ U.P. Intensive

Composition : 0,24 % de hyaluronate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique dodécahydraté, phosphate monosodique di-hydraté et eau pour injection.

Utilisation : Hydratation de l'œil et humidification durant le port de lentilles de contact (souples et rigides)

Qu'est-ce que Aqualarm™ U.P. Intensive ?

Aqualarm™ U.P. Intensive est une solution ophtalmique qui contient 0,24 % d'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium). La formule est très bien tolérée car sans conservateur.

Aqualarm™ U.P. Intensive procure un soulagement rapide et durable des symptômes de sécheresse oculaire.

Aqualarm™ U.P. Intensive se conserve 6 mois après ouverture.

Quelles sont les utilisations possibles de Aqualarm™ U.P. Intensive ?

Aqualarm™ U.P. Intensive est indiqué pour hydrater et apaiser instantanément les yeux secs. Il rafraîchit agréablement et apaise vos yeux en soulageant les symptômes liés à la sécheresse oculaire (yeux fatigués, irrités, mais aussi les yeux larmoyants).

Aqualarm™ U.P. Intensive convient pour l'humidification durant le port de lentilles de contact souples et rigides et améliore le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée.

Quand devez-vous utiliser Aqualarm™ U.P. Intensive ?

Aqualarm™ U.P. Intensive contient de l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium), hydratant naturel présent dans les structures de l'œil humain sain et dans le film lacrymal naturel.

Aqualarm™ U.P. Intensive est conçu pour rester sur la surface de l'œil, fournir une hydratation instantanée, ce qui permet un soulagement des symptômes liés à la sécheresse oculaire. Il s'agit d'un produit adapté aux personnes souffrant de symptômes de sécheresse oculaire, tels que les yeux fatigués, stressés, brûlants et/ou larmoyants.

La sécheresse oculaire est provoquée (ou exacerbée) par :

- des facteurs externes, comme l'utilisation intensive d'un ordinateur, la climatisation, le chauffage, la fumée de cigarette, les environnements extérieurs venteux ainsi que le port de lentilles de contact.
- d'autres facteurs, comme certains médicaments (tels que la pilule contraceptive, les antihistaminiques, les bêtabloquants, les antispasmodiques et les diurétiques) ou certaines maladies qui jouent un rôle dans le développement de la sécheresse oculaire.


Fréquence et durée du traitement par Aqualarm™ U.P. Intensive ?

Instillez 1 goutte d'Aqualarm™ U.P. Intensive dans l'œil lorsque vous en ressentez le besoin. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement aussi fréquemment que souhaité. Il n'y a pas de limitation de durée d'utilisation.

Comment utiliser Aqualarm™ U.P. Intensive ?

Aqualarm™ U.P. Intensive dispose d'un mécanisme de pompe breveté permettant de ne pas inclure d'agent conservateur. Il est possible que ce flacon soit différent de ceux que vous avez pu utiliser dans le passé.

Note Générale : Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Évitez tout contact entre l'embout du flacon et vos doigts ou la surface de votre œil afin d'éviter tout risque de contamination de la solution ou de blessure de l'œil.

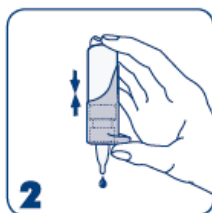

1. Avant chaque utilisation, enlevez le bouchon protecteur de l'embout du flacon par un mouvement rotatif.
2. **Attention ! Avant la première utilisation et si le flacon n'a pas été utilisé depuis un certain temps :** Retournez le flacon vers le bas, appuyez sur le mécanisme de la pompe de façon répétée, jusqu'à ce qu'une goutte tombe.
3. Tenez le flacon comme indiqué : Placez votre pouce sur le support pouce ergonomique et entourez la partie inférieure avec vos doigts. Deux doigts doivent être placés en-dessous du flacon.
4. Retournez le flacon et penchez légèrement la tête en arrière. Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon en position verticale au-dessus de l'œil, comme indiqué, et appuyez doucement sur le mécanisme de pompe pour instiller une goutte dans votre œil. Fermez l'œil et clignez des yeux afin de diffuser la solution uniformément à la surface de votre œil. Immédiatement après utilisation, secouez le flacon pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles et remplacez le bouchon protecteur sur l'embout du flacon.

En raison de la conception du flacon, il reste un peu de solution dans le flacon. Cependant, le volume de remplissage spécifié pourra être complètement extrait du flacon.

Quand ne faut-il pas utiliser Aqualarm™ U.P. Intensive ?

N'utilisez pas ce produit en cas d'allergie à l'un des composants.

Informations importantes concernant l'utilisation de Aqualarm™ U.P. Intensive

- Des réactions d'hypersensibilité locale ont été très rarement rapportées. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu. Si vous ressentez une gêne ou une irritation persistante, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.
- Information de sécurité pour les patients présentant une altération importante de la cornée : dans de très rares cas, des dépôts de phosphate de calcium sur la cornée ont été rapportés en association avec l'utilisation de collyre contenant des phosphates.
- Évitez de toucher la surface de l'œil avec l'embout du flacon pour éviter tout risque de blessure ou de contamination de la solution.
- Une fois ouvert, ne partagez pas le flacon avec d'autres personnes.
- Une mauvaise manipulation du produit, contraire aux instructions d'utilisation, peut provoquer le glissement du flacon de votre main et causer des blessures à l'œil.
- Secouez le flacon après utilisation pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles.
- Attendez environ 15 minutes avant d'utiliser un autre produit ophtalmique.
- Jetez le dispositif médical 6 mois après ouverture.
- Veuillez ne plus utiliser le produit après la date d'expiration.
- N'utilisez pas ce produit si le flacon ou l'emballage est endommagé.
- Le flacon de Aqualarm™ U.P. Intensive contient de petites pièces en plastique pouvant être avalées par de jeunes enfants. Il existe un risque d'étouffement, c'est pourquoi Aqualarm™ U.P. Intensive doit être tenu hors de portée des enfants.
- Aqualarm™ U.P. Intensive peut être utilisé avec des lentilles de contact souples et rigides.
- Ce produit peut être utilisé par une personne non initiée, n'ayant reçu aucune formation particulière.
- Consultez un professionnel de santé avant d'utiliser un lubrifiant oculaire chez les enfants.
- Selon les connaissances actuelles et l'expérience du marché, ce produit peut également être utilisé par les femmes enceintes et les mères qui allaitent.

Comment conserver Aqualarm™ U.P. Intensive ?

À conserver à une température comprise entre + 1 °C et + 25 °C.

Le flacon est conçu de sorte que vous puissiez utiliser Aqualarm™ U.P. Intensive pendant 6 mois après ouverture.

Élimination : Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Tout incident grave dû à l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente concernée (ANSM).

Conditionnement :

Aqualarm™ U.P. Intensive est disponible en conditionnement de 10 mL de collyre.

Explication des symboles



Évaluation européenne de la conformité des dispositifs médicaux
Marquage de conformité CE




Identifiant unique de dispositif
GTIN (01) identifiant de dispositif
EXP (17) date limite d'utilisation
(format : aammjj)
LOT (10) numéro de lot



Consulter le mode d'emploi
ou consulter le mode
d'emploi électronique



Fabricant :
Dr. Gerhard Mann
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm
165/173
13581 Berlin, Allemagne

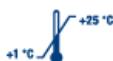

Limite de température



Ne pas utiliser si l'emballage ou le
flacon est endommagé et consulter
les instructions d'utilisation



Après la première utilisation, le
dispositif médical se conserve 6 mois



Date limite d'utilisation (AAAA-MM)



Attention



Système de barrière stérile
unique



Stérilisé à l'aide de
techniques de traitement
aseptique



Numéro de lot



Date de fabrication



Dispositif médical

Date de publication : Aqualarm™ U.P. Intensive, I931EU-07; (2024-08)

49714PB931/11-FR 290E11-03.25